

Så använder du Aironir® Autohaler®



Till dig som ordinerats detta läkemedel.

Varför Airomir Autohaler?

Det här läkemedlet har ordinerats av din läkare, det används för att lindra symtom vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Det är viktigt att du följer de instruktioner och den dos som din läkare ordinerat även om du känner dig bättre. Hör av dig till din läkare eller sjuksköterska om du har frågor. Läs bipacksedeln i förpackningen eller på www.fass.se.

Autohaler skall inte användas tillsammans med en s.k. spacer (andningsbehållare).

Två testpuffar innan första användningen

Du behöver testa Airomir Autohaler innan du använder den första gången eller om du inte har använt den på minst 2 veckor. Ta av locket och upprepa följande steg två gånger:

1. Dra upp spaken på ovansidan så den fastnar i upprätt läge.
2. Vänd inhalatorn så munstycket pekar bort från dig, knuffa sen på bottenplattan som sitter på inhalatorns undersida så att den avger en puff.
3. Fäll ner spaken på ovansidan.

Hur vet jag när Airomir Autohaler är tom?

När du inte kan känna vätskan i inhalatorn när du skakar den lätt, eller om det inte kommer någon puff när du trycker av den med anordningen på undersidan, då är den tom.

Skötselråd

- Rengör munstycket med en ren, torr servett varje vecka. Tänk på att Airomir Autohaler inte får spolras under vatten.
- Använd före utgångsdatumet på förpackningen.
- Förvaras vid högst 30°C.
- Undvik hög värme som direkt solljus.
- Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller gammal medicin lämnas till apotek för omhändertagande.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Så här använder du Airomir Autohaler

1



Ta av locket genom att dra i bakkanten. **Skaka** inhalatorn lätt.

2

Håll inhalatorn upprätt, **dra i spaken** på ovsidan så den fastnar i upprätt läge.



3

Andas ut ordentligt, slut sedan läpparna tätt kring munstycket och **andas in djupt och långsamt**. Håll andan i 10 sekunder, andas sedan ut sakta.



4

Fäll ner spaken på ovsidan och sätt på locket.



Var noga med att inte täcka för ventilöppningen på undersidan vid inhalation.

När spragen utlöses hörs ett "klick". Det är **viktigt** att du fortsätter andas in även efter det.

Om du ska ta fler inhalationer: Upprepa samtliga steg.

För mer information,
läs bipacksedeln i
förpackningen eller
på www.fass.se

Scanna QR-kod för instruktionsfilm på hur du använder Airomir Autohaler



Airomir® Autohaler® (salbutamol) Inandningsstyrd inhalationsspray. Receptbelagt läkemedel. **Användning:** Airomir Autohaler används för symtomlindring vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Observera att läkemedlet i första hand skall användas för att lindra akuta besvär hos vuxna och barn från 4 år. **Varningar och försiktighet:** Om astmabesvären tilltar eller om effekten av Airomir Autohaler försämras, ska man omedelbart kontakta läkare. Upprepade inhalationer som inte ger effekt vid svåra astmaanfall kan betyda att annan behandling behövs. Autohaler skall inte användas tillsammans med en s.k. spacer (andningsbehållare). Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. **Läs bipacksedeln noga.** Airomir Autohaler tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Maj 2022

Teva Sweden AB

Kungstorget 8 | Box 1070 | 251 10 Helsingborg
Tel 042 12 11 00 | www.teva.se

